

Que contient le sac de transport ?

- Housse de transport
- Biberon Natural 125ml x2 (tétine non incluse)
- Disque d'étanchéité Chargeur micro-USB
- Petite housse isotherme
- 1 bloc moteur
- Dimensions : 145 x 95 x 45 mm
- Poids : 360g
- Kit de tire-lait à double tétérelle



Simple à utiliser, rapide et confortable

Peu importe quand vous décidez de tirer votre lait, l'important est que ce soit simple, rapide et confortable.



Le tire-lait Natural Motion est un dispositif médical fabriqué par Philips. Il est destiné à recueillir le lait du sein d'une femme qui allaite. Lisez attentivement la notice d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Février 2023

Philips France Commercial - 33, rue de Verdun - CS60055 - 92156 Suresnes Cedex France -
S.A.S.U au capital de 3 100 000 €, R.C.S Nanterre 811 847 243

PHILIPS
AVENT




TIRE-LAIT ELECTRIQUE NATURAL MOTION

DISPONIBLE EN LOCATION

Inspiré par les bébés, confortable pour les mamans

Technologie de mouvement naturel, qui assure un équilibre entre l'aspiration et la stimulation des mamelons, permettant d'obtenir un débit de lait plus rapide*.

Pourquoi notre tire-lait Philips AVENT électrique double pompage est le bon choix ! Découvrez ses caractéristiques uniques sur le marché :

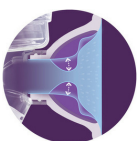

Une tétérèlle adaptative de taille unique qui convient à tous types de mamelons. Il convient à 99,98 % des tailles de mamelons** (jusqu'à 30 mm). Le coussin masseur vient apporter en complément une expérience plus confortable.



Conçu pour une utilisation plus confortable en position verticale, plus besoin de se pencher.



Permet une utilisation en toute discrétion au travail ou en déplacement grâce au bloc moteur silencieux et léger.



Offre une expérience personnalisée: 8 modes de stimulation à intensité progressive + 16 réglages d'expression pour réguler le flux de lait.



* Basé sur les temps de montée de lait (délai du réflexe d'éjection du lait ou REL) provenant d'essais cliniques réalisés auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019) comparés aux délais de REL de la technologie de tire-lait Philips antérieure provenant d'une étude de faisabilité réalisée auprès de 9 participantes (Pays-Bas, 2018). ** Sur la base des résultats du questionnaire sur 1 000 coussins provenant d'un essai clinique réalisé auprès de 20 participantes (Pays-Bas, 2019)

Mode d'emploi

Comment assembler le tire-lait ?




1. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau savonneuse.

2. Insérez la valve aussi loin que possible dans le corps du tire-lait.




3. Vissez le corps du tire-lait sur le biberon.

4. Placez le coussin dans le corps du tire-lait et poussez la partie intérieure du coussin dans l'entonnoir contre la ligne.

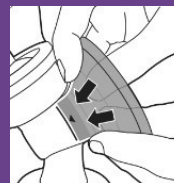

5. Placez le diaphragme en silicone dans le corps du tire-lait. Assurez-vous que le diaphragme couvre parfaitement le bord en appuyant doucement dessus avec vos pouces.

6. Fixez le tube en silicone et le capuchon sur le diaphragme en silicone. Abaissez le bouchon jusqu'à ce qu'il soit correctement fixé.

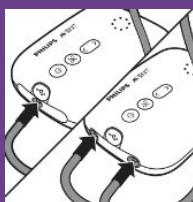


6. Fixez les tubes aux moteurs, branchez l'adaptateur sur la prise secteur et insérez la prise à l'autre extrémité dans le bloc moteur.

Comment le tire-lait fonctionne-t-il ?




1. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau savonneuse et veillez à ce que votre sein soit propre.

2. Placez le tire-lait sur vos seins. Assurez-vous que vos mamelons soient centrés.

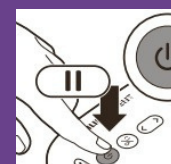



3. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'allume.

4. Le tire-lait démarre en mode de stimulation et augmente son aspiration jusqu'au dernier niveau d'aspiration utilisé (ou jusqu'au niveau 5 lors de la première utilisation).

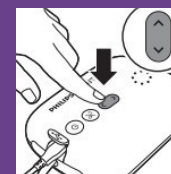

5. Utilisez les boutons de hausse et de baisse d'intensité pour changer de niveau d'aspiration à votre convenance.

6. Lorsque le lait commence à s'écouler, changez de mode manuellement à l'aide du bouton de sélection de mode. Si vous n'avez pas changé de mode manuellement : après 90 secondes de stimulation, le tire-lait passe doucement en mode d'expression automatiquement.

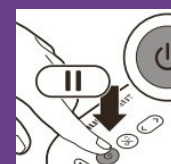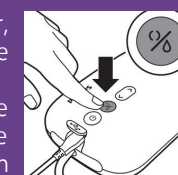

7. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre l'appareil en pause. Pour reprendre l'aspiration, appuyez de nouveau sur le bouton marche/arrêt. Pour éteindre le tire-lait, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé.